

OCUTEIN[®]

SENSITIVE PLUS



Krople do oczu

Nawilżające krople do oczu z hialuronianem sodu i ekstraktem z borówki

Dla wrażliwych, przemęczonych oczu

Wyrób medyczny
15 ml

Każdego dnia Twoje oczy są poddawane różnym stresującym czynnikom: ekrany, monitory, telefony, telewizja, czytanie, prowadzenie samochodu. A są to tylko niektóre z wyzwań, z którymi nasze oczy muszą sobie radzić, abyśmy mogli prowadzić aktywne, nowoczesne życie. Kiedy Twój wzrok skupiony jest na przedmiotach małych lub znajdujących się blisko, mięśnie oka nie poruszają się odpowiednio, stają się słabe, a mruganie jest rzadsze. W rezultacie Twoje oczy nie są wystarczająco nawilżone i stają się podrażnione.

Istnieje wiele sposobów dbania o suche, wrażliwe i przemęczone oczy: spędzanie większej ilości czasu na zewnątrz, robienie regularnych przerw podczas pracy, wykonywanie ćwiczeń relaksujących oczy.

Prawidłowe nawyki higieniczne również stanowią ważny element pielęgnacji oczu. Jednym z nich jest stosowanie nawilżających kropli do oczu.

Dlaczego **OCUTEIN SENSITIVE PLUS** z hialuronianem sodu i ekstraktem z borówki stanowi tak wspaniałą pomoc dla Twoich oczu?

Nawilżające krople do oczu z hialuronianem sodu i ekstraktem z borówki:

- nawilżają;
- łagodzą podrażnienia;
- wspomagają regenerację oczu;
- mogą być stosowane z soczewkami kontaktowymi.

Krople **OCUTEIN SENSITIVE PLUS** zawierają kwas hialuronowy. Kwas hialuronowy jest naturalnym składnikiem organizmu. Dzięki swojej zdolności do wchłaniania wody przywraca prawidłowy film łzowy oka, czyni go stabilnym i integralnym.

Krople **OCUTEIN SENSITIVE PLUS** są idealne, jeżeli:

- czujesz w oku ciało obce w wyniku działania wiatru, kurzu i światła słonecznego;
- odczuwasz podrażnienie spowodowane długą pracą przy komputerze lub prowadzeniem pojazdu;
- używasz soczewek kontaktowych przez długi czas;
- przebywasz w klimatyzowanych pomieszczeniach;
- stosujesz soczewki kontaktowe (mogą być stosowane z soczewkami kontaktowymi).

Wskazania: Nawilżają i koją suche, odwodnione i zmęczone oczy. Zalecane szczególnie dla wrażliwych oczu. Działanie kwasu hialuronowego (soli kwasu hialuronowego) sprawia, że krople są idealne w przypadku zmian nieurazowych i niepatologicznych i pomagają chronić oraz nawilżać powierzchnię oka.

Sposób użytkowania: Zaaplikuj jedną lub dwie krople do każdego oka raz lub kilka razy dziennie, gdy odczuwasz taką potrzebę albo zgodnie ze wskazówkami okulisty. W przypadku soczewek kontaktowych należy nałożyć 2-3 krople na soczewkę przed lub po jej użyciu. Nakładaj krople na soczewki kilka razy dziennie lub w razie potrzeby.

Ostrzeżenia:

- jeśli wystąpi podrażnienie oczu, należy przerwać stosowanie produktu i skontaktować się z lekarzem;
- nie stosować produktu, jeśli występuje uczulenie lub nadwrażliwość na którykolwiek z jego składników;
- nie dotykać powierzchni oka zakraplaczem;
- trzymać z dala od źródła ciepła, przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od 5 do 35°C;
- przechowywać poza zasięgiem dzieci;
- nie spożywać;
- nie stosować po upływie terminu ważności;
- zużyć w ciągu 90 dni od pierwszego otwarcia;
- do pierwszego użycia krople są sterylne;
- dokładnie zakręcać butelkę po każdym użyciu;
- nie używać produktu, jeśli opakowanie jest uszkodzone.

Przeciwwskazania:

Brak przeciwwskazań.

Skład: Hialuronian sodu 0,10% (sól sodowa kwasu hialuronowego), płynny ekstrakt z borówki, wersenian disodowy, POLIHEKSAMETYLEN BIGHUANIDU, buforowany roztwór izotoniczny (pH 7,2).

Dystrybutor:

Simply You Novascon Sp. z o.o.
Al. Jana Pawła II 80
00-175 Warszawa

Simply You
NOVASCON

Wytwórca:

Omisan farmaceutici
via Galilei, Guidonia M. (Rm) Italy

CE MD
0051 STERILE A



5°C 35°C



OZNACZENIE SYMBOLI NA OPAKOWANIU:

MD	i	LOT	LOT	LOT	LOT	LOT
Medical device/ wyrób medyczny	Zajrzyj do instrukcji używania	Użyj do daty	Numer serii produkcyjnej	Dopuszczalna temperatura	Trzymać z dala od światła słonecznego	Wytwórca/ Producent